



# ¡Importante!

Cómo asegurarse que usted recibe el nivel de sonido adecuado para sus necesidades

1. Comience ajustando el control del Tono en el medio entre el valor bajo (Low) y alto (High).

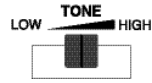

2. Asegúrese que el control del Volumen se encuentra en el medio entre el valor bajo (Low) y alto (High).

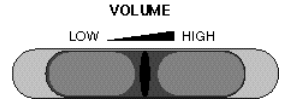

3. Haga una llamada.

4. Presione el botón de Volumen (**VOL**) para prender la amplificación.



5. A medida que escucha la persona en el otro extremo de la línea, experimente al lentamente aumentar el ajuste del Volumen. También, trate de mover el control del Tono ligeramente en dirección del valor bajo (Low) o alto (High).

Usted necesita ajustar esto solamente una sola vez. Cada vez que usted presione el botón **VOL**, el *CrystalTone* usará estos valores.

**NOTA:** Algunos aparatos usados para ayudar a las personas con problemas de oído, pueden ser sensitivos cuando los sonidos de alta frecuencia son amplificados. Si usted experimenta un "ruido extraño" por favor trate lo siguiente:

- Mueva el control del **TONE** ligeramente en dirección hacia el valor bajo (Low).
- Mueva el control del **VOLUME** ligeramente en dirección hacia el valor bajo (Low).
- Cambie el interruptor de **Crystal Tone** al valor "B" para reducir la amplificación de alta frecuencia. Luego, repita los pasos arriba mencionados. (Este interruptor se encuentra debajo de su teléfono.)